


# for Asept

## PROFESIONĀLIE DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI



# Kāpēc forAsept?

- ❖ Efektivitāte
- ❖ Ekspress ekspozīcija
- ❖ Pielietošanas drošība
- ❖ Ražotāja cenas
- ❖ Pielietošanas vienkāršība
- ❖ Patīkami aromāti uz dabīgu ēterisko eļļu bāzes

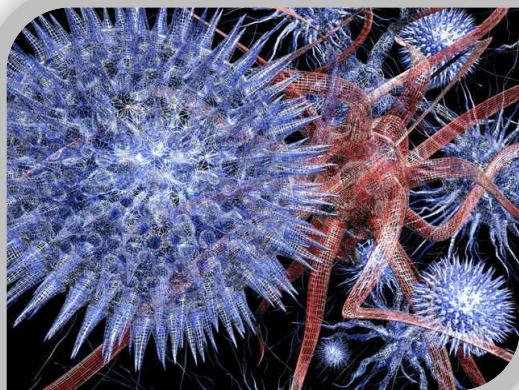

Visiem līdzekļiem piemīt baktericīda, virucīda  
un fungicīda iedarbība.

Piemīt aktivitāte attiecībā uz:

**baktērijām:** gramnegatīvām un grampozitīvām, ieskaitot tuberkulozes mikobaktērijas;

**vīrusiem:** A, B un C hepatītu vīrusus, HIV, poliomiēlītu, adenovīrusiem, enterovīrusiem, rotavīrusiem, SARS „atipiskās pneimonijas” vīrusiem, H5N1 „putnu gripas”, A/H1N1 „cūku gripas”, cilvēka gripas, herpesa vīrusiem utt.

**sēnītēm:** Kandida, Trihofiton.

## Kā produktu aromatizatorus izmanto dabīgo ēterisko eļļu maisījumus. Iespējams izvēlēties:



### **Piparmētra un tējas koks \* Mentha Piperita, Melaleuca Alternifoli**

Līdzeklim piedod vieglu, svaigu, uzmundrinošu aromātu. Neitralizē smakas un dezinficē gaisu.

Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, pretvēģu, nomierinošs, dezodorējošs, rētas-dziedējošs, izteikta attīroša iedarbība uz ādu.



### **Saldais apelsīns un ingvers \*Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Zingiber Officinale Root Oil**

Līdzeklim piedod vieglu, siltu un atsvaidzinošu aromātu. Neitralizē smakas un dezodorē gaisu.

Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, nomierinoša un dezodorējoša iedarbība. Piedod ādai maigumu un elastību, piemīt viegls balinošs efekts. Sekmē rētu sadzīšanu.



### **Kalnu lavanda un tējas koks \*Lavandula Angustifolia, Melaleuca Alternifoli**

Līdzeklim piedod svaigu, tīru, rūgtenu aromātu. Neitralizē smakas un dezodorē gaisu.

Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, pretvēģu, nomierinošs, dezodorējošs, rētas-dziedējošs, izteikta attīroša iedarbība uz ādu.



### **Ilang-ilang, sandals, bergamonts, apelsīns \*Cananga Odorata, Santalum Album Oil, Citrus Bergamia, Citrus Sinensis**

Piedod līdzeklim dziļu, smalku un eksotisku aromātu. Neitralizē smakas un dezodorē gaisu.

Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, baktericīda iedarbība. Mitrina, izlīdzina ādu, piedod tai elastību, samtainumu un maigumu. Ilgstoši dezodorē un aromatizē ādu.



## Līdzekļi paredzēti:



Ārstnieciski-profilaktiskiem uzņēmumiem, stomatoloģijas, oftalmoloģijas klīnikām, bērnu klīnikām, laboratorijām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, frizētavām, masāžas saloniem, skaistumkopšanas saloniem, SPA-centriem, solārijiem, pārtikas rūpniecībai, tirdzniecības uzņēmumiem, komunālajiem objektiem, viesnīcām, baseiniem, akvaparkiem, pirtīm, saunām, sporta iestādēm, sporta klubiem, fitnesa centriem, boulingiem, slēpju bāzēm, slidotavām, pārtikas produktu ražotnēm, skolas un pirmsskolas iestādēm, mājsaimniecībām un citām iestādēm, kam nepieciešama dezinfekcija.

## Izmanto sekojošiem mērķiem:



telpu, mēbeļu, iekārtojuma priekšmetu, aparātu, iekārtu virsmu, veļas, trauku, trauku mazgāšanas priekšmetu, gumijas un polipropilēna paklāju, rotaļlietu, sporta inventāra, slimnieku kopšanas priekšmetu, personiskās higiēnas, medicīnisko mērķu izstrādājumu, cieto un elastīgo endoskopu, ķirurģisko un stomatoloģisko instrumentu, frizētavu instrumentu, manikīra un pedikīra instrumentu, solāriju virsmu, masāžas salonu mazgāšanai un dezinfekcijai, roku un cimdu dezinfekcijai, kāju dezinfekcijai, apavu, slīdu, slēpju zābaku iekšējās virsmas dezinfekcijai un dezodorēšanai, dažādu nepatīkamu smaku neitralizācijai un novēršanai.

# forAsept Professional koncentrāts

## Dezinficējošs līdzeklis ar mazgājošu efektu virsmu un priekšmetu dezinfekcijai.

**Aktīvā viela:** četrainzvietotā amonija savienojumi- alkildimetilbenzilamonija hlorīds

Līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas ūdens šķīdums, praktiski bez smaržas vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu. Koncentrāta pH  $7,2 \pm 1,0$ .

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikrobiem, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, piemīt labas mazgāšanas īpašības, nefiksē organiskos netīrumus, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis.

**Pielietošana:** Jebkuru virsmu un priekšmetu, iekārtu, instrumentu, trauku, inventāra dezinfekcijai.

Koncentrāta derīguma termiņš 2 gadi. Atšķaidītu šķīdumu izmantošanas termiņš 14 dienas.

Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot” vai mērcējot. Atšķaidīta šķīduma noskalošana no apstrādātajām virsmām pēc dezinfekcijas nav nepieciešama. Ja nepieciešams var noslaucīt ar tīru/mitru salveti. Galda traukus, laboratorijas traukus, iekārtas, instrumentus, rotaļlietas pēc dezinfekcijas noskalo tekošā ūdenī.

### Darba šķīdumu sagatavošana:

Saskaņā ar izvēlēto šķīduma koncentrācijas un ekspozīcijas laiku nepieciešamo līdzekļa daudzumu pievienot tīram ūdenim.

10 litru līdzekļa šķīduma sagatavošanai:

0,5% šķīdumam – 50ml līdzekļa un 9950 ml ūdens

1% šķīdumam – 100 ml līdzekļa un 9900 ml ūdens

5% šķīdumam – 500 ml līdzekļa un 9500 ml ūdens

1 litra līdzekļa šķīduma sagatavošanai:

0,5% 5 ml līdzekļa un 995 ml ūdens

1% 10 ml līdzekļa un 990 ml ūdens

5% 50 ml līdzekļa un 950 ml ūdens

### Iepakojuma veidi:

040/1 1 L

040/5 5 L

Ekspozīcijas laiks:	0,5%	1%	5%
Baktērijas:	5 min	3 min	2 min
Mikobaktērija B5:	10 min	5 min	5 min
Sēnītes:	30 min	30 min	15 min
Vīrusi:	60 min	15 min	5 min





# forAsept Professional gatavs šķīdums

## Dezinficējošs līdzeklis ar mazgājošu efektu virsmu un priekšmetu dezinfekcijai

**Aktīvā viela:** četraizvietotā amonija savienojumi –alkildimetilbenzilamonija hlorīds.

Pielietošanai gatavais līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas ūdens šķīdums, praktiski bez smaržas vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu. pH  $7,0 \pm 0,3$ .

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikrobiem, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, piemīt labas mazgāšanas īpašības, nefiksē organiskos netīrumus, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis.

### Pielietošana:

Jebkuru virsmu un priekšmetu, iekārtu, instrumentu, trauku, inventāra dezinfekcijai. Derīguma termiņš 2 gadi. Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot” vai mērcējot. Līdzekļa noskalošana no apstrādātajām virsmām pēc dezinfekcijas nav nepieciešama. Ja nepieciešams var noslaucīt ar tīru/mitru salveti.

Galda traukus, laboratorijas traukus, iekārtas, instrumentus, rotaļlietas pēc dezinfekcijas noskalo tekošā ūdenī.

### Iepakojuma veidi:

041	200 ml ar smidzinātāju
041/1	1 L
041/5	5 L

### Ekspozīcijas laiks

Baktērijas:	2 min.
Mikobaktērijas B5:	5 min.
Sēnītes:	15 min.
Vīrusi:	5 min.



# forAsept Pluss

## Līdzeklis ātrai virsmu un priekšmetu dezinfekcijai

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (28% ±2%) maisījums, Alkildimetilbenzilamonija hlorīds.

Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas ūdens šķīdums, ar vieglu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikrobiem, ekspress-ekspozīcija no 3-5 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz apstrādājamām virsmām, nav nepieciešams noskalot, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ērts dezinfekcijai grūti pieejamās vietās.

**Pielietošana:** Ātrai virsmu un priekšmetu, iekārtu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, solārijos, viesnīcās, tirdzniecības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, izglītības, komunālās un sporta iestādēs/uzņēmumos. Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot”. Pie izlietojuma normas 40-50ml/m<sup>2</sup> līdzeklis neizsauc kairinājumu un nerada toksisku iedarbību. Līdzeklim nepiemīt vietēji-kairinošas iedarbība uz ādu; nepiemīt sensibilizējoša iedarbība

### Iepakojuma veidi:

042	200 ml ar smidzinātāju
042/1	1 L
042/5	5 L

### Ekspozīcijas laiks:

<b>Baktērijas:</b>	3 min.
Mikobaktērijas B5:	5 min.
Sēnītes:	5 min.
Vīrusi:	5 min.





# forAsept Strong

## Līdzeklis ātrai virsmu un priekšmetu dezinfekcijai

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (63%  $\pm$  2%) maisījums, alkildimetilbenzilamonija hlorīds.

Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikrobiem, ekspress-ekspozīcija no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz apstrādājamām virsmām, nav nepieciešams noskalot, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, kas noturīgas pret spirta iedarbību, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ērts dezinfekcijai grūti pieejamās vietās.

**Pielietošana:** Ātrai virsmu un priekšmetu, iekārtu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, viesnīcās, tirdzniecības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, izglītības, komunālās un sporta iestādēs/uzņēmumos. Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot”.  
Izlietojuma norma: ne vairāk kā 50ml/m<sup>2</sup> (vidēji – 30-40 ml/m<sup>2</sup>).

### Iepakojuma veidi:

043	200 ml ar smidzinātāju
043/1	1 L
043/5	5 L

### Ekspozīcijas laiks

Baktērijas:	30 sek.- 1 min.
Mikobaktērijas B5:	3 min.
Sēnītes:	3 min.
Vīrusi:	1 min.



# forAsept Strong Instrumentiem

## Līdzeklis ātrai instrumentu dezinfekcijai.

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (65% ±2%) maisījums, alkildimetilbenzilamonija hlorīds, korozijas inhibitori.

Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspress-ekspozīcija no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz apstrādājamām virsmām, nav nepieciešams noskalot, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, kas noturīgas uz spirta iedarbību, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ērts dezinfekcijai grūti pieejamās vietās.

**Pielietošana:** Ātrai instrumentu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot”.

### Iepakojuma veidi:

046	200 ml ar smidzinātāju
046/1	1 L
046/5	5 L

### Ekspozīcijas laiks

Baktērijas:	30 sek.- 1 min.
Mikobaktērijas B5:	3 min.
Sēnītes:	3 min.
Vīrusi:	1 min.



# forAsept Pluss rokām

## Līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (28% ±2%) maisījums, alkildimetilbenzilamonija hlorīds, mīkstināošas un mitrinošas piedevas, ēteriskās eļļas.

Lietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar vieglu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspres-eksponēcija no 30 sekundēm līdz 5 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz rokām, nav nepieciešams noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, nesaussina roku ādu, piemīt ilgstoša iedarbība 3 stundu garumā.

**Pielietošana:** Ātrai roku un cimdu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un citās iestādēs, kur nepieciešama roku dezinfekcija. Dezinfekciju veic paberžot, saslapinot.

### Iepakojuma veidi:

044	200 ml ar smidzinātāju
044/1	1 L
044/5	5 L

### Eksponēcijas laiks

Baktērijas:	3 min.
Mikobaktērijas B5:	5 min.
Sēnītes:	5 min.
Vīrusi:	5 min.





# forAsept Strong rokām

## Līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (63%  $\pm$ 2%) maisījums, alkildimetilbenzilamonija hlorīds, mīkstinošas un mitrinošas piedevas, ēteriskās eļļas.

Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbības uz mikroorganismiem, ekspress-eksponēcija no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ļoti ātri nožūst, neatstāj pēdas uz rokām, nav nepieciešams noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, nesausa roku ādu, piemīt ilgstoša iedarbība 3 stundu garumā.

**Pielietošana:** Ātrai roku un cimdu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un citās iestādēs, kur nepieciešama roku dezinfekcija.

Dezinfekciju veic paberžot, saslapinot.

### Iepakojuma veidi:

045	200 ml ar smidzinātāju
045/1	1 L
045/5	5 L

### Eksponēcijas laiks

Baktērijas:	30 sek.- 1 min.
Mikobaktērijas B5:	3 min.
Sēnītes:	3 min.
Vīrusi:	1 min.



# forAsept Strong kājām

## Līdzeklis ātrai kāju dezinfekcijai

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (63%  $\pm$ 2%) maisījums, alkildimetilbenzilamonija hlorīds, mīkstinošas un mitrinošas piedevas, ēteriskās eļļas. Lietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspress-ekspozīcija no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ļoti ātri nožūst, neatstāj pēdas, nav nepieciešams noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, nesausina ādu, piemīt ilgstoša iedarbība 3 stundu garumā. Samazina kāju svīšanu un tās radīto nepatīkamo smaku. Rada ādas un nagu sēnīšu slimību ierosinātāju attīstībai nepiemērotu vidi. Pateicoties dabīgo eļļu esamībai, palīdz atjaunot ādas aizsargfunkcijas.

### Pielietošana:

Kāju dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, skaistuma salonos, SPA-centros, un citās iestādēs, kur nepieciešama kāju dezinfekcija. Uzsmidzināt uz kājām un ļaut nožūt. Iedarbības laiks 30 sekundes.

### Iepakojuma veidi:

045	200 ml ar smidzinātāju
045/1	1 L
045/5	5 L

## Ekspozīcijas laiks

Baktērijas:	30 sek.- 1 min.
Mikobaktērijas B5:	3 min.
Sēnītes:	3 min.
Vīrusi:	1 min.



# forAsept Strong apaviem

## Līdzeklis ātrai apavu dezinfekcijai

**Aktīvās vielas:** Etanola un propanola-2 (63% ±2%) maisījums, alkildimetilbenzilamonija hlorīds, ēteriskās eļļas.

Lietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.

**Priekšrocības:** Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspress-ekspozīcija no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ļoti ātri nožūst, neatstāj pēdas, nav nepieciešams noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ir ilgstoša iedarbība, neitralizē smakas.

### Pielietošana:

Ātrai apavu dezinfekcijai ārstnieciskās profilaktiskās iestādēs, sporta klubos, boulinga centros, slidotavās, slēpju zābaku nomas punktos, kur nepieciešama apavu dezinfekcija. Iesmidzināt apavos 3 ml, ievērojot, lai visas apavu iekšējās virsmas būtu pārklātas, ļaut nožūt.

### Iepakojuma veidi:


047	200 ml ar smidzinātāju
047/1	1 L
047/5	5 L

## Ekspozīcijas laiks

Baktērijas:	30 sek.- 1 min.
Mikobaktērijas B5:	3 min.
Sēnītes:	3 min.
Vīrusi:	1 min.





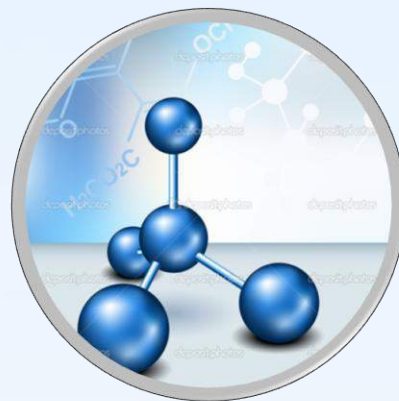

***SIA «ITLA.LV»***

***Ražošana, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība***

***Maskavas 250, Rīga, LV 1063, t. +371 67112985, +371 67241767, mob. +371 29262290***