

Lietošanas instrukcija

„Medicīniskās zeķes ar pretsēnīšu, pretmikrobu iedarbību “forA”

Pielietojums: aizsargā kājas no baktēriju un sēnīšu infekciju. Nodrošina augstas higiēniskās īpašības, novērš nepatīkamu smaku. Palīdz samazināt pārmērīgu kāju svīšanu. Kājām nodrošina svaigumu un komfortu.

Profilakses nolūkā: izstrādājumi paredzēti kāju sēnīšu un kāju ādas strutaino slimību profilaksei. Paredzēti pēdu ādas aizsardzībai, sniedz izteikti fungicīdu un baktericīdu iedarbību. Profilakses nolūkos īpaši rekomendēti cilvēkiem, kuri ilgstošu laiku pavada apavos, veicot sporta un fiziskās aktivitātes, paaugstinātas kāju svīšanas gadījumā. Izmantojot izstrādājumus, tiek panākta cilvēka aizsardzība pret ārējo infekciju, pazeminās infekcijas procesa rašanās risks uz ādas uz autogēnās inficēšanas rēķina un tiek pārtraukts infekcijas nodošanas ceļš ārējā vidē.

Medicīniskās indikācijas: paredzēti slimniekiem ar pēdu un nagu mikozi, piodermiju. Paredzēti ādas mikrobu un sēnīšu uzsējumu pazemināšanai, ādas aizsardzībai pret mikroorganismiem, kuri ienāk no ārējās vides, lai samazinātu izstrādājuma virsmas kontamināciju. Nodrošina pastāvīgu pretmikrobu un pretsēnīšu iedarbību uz ādu izstrādājuma izmantošanas laikā, kas veicina pozitīvu dinamisku sēnīšu slimību un piodermiju ārstēšanas procesā. Pēc ādas slimības izārstēšanas izstrādājumu ieteicams izmantot kā līdzekli, kurš veicina recidīvu novēršanu.

Pielietošana: zeķes uzvilkt tīrās kājas un nēsāt visu dienu. Izstrādājumus mazgāt neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā pie temperatūras 35-40°C, nemazgāt ar saimniecības ziepēm. Izspiest, iztaisnot un izžāvēt. Ir iespēja mazgāt veļas mašīnā saudzējošā režīmā. Izstrādājums saglabā savas pretmikrobu, pretsēnīšu īpašības pēc 30 mazgāšanas reizēm.

Kontrindikācijas: individuāla nesaderība ar kādu no izstrādājuma izejvielu komponentiem.

Glabāšana: izstrādājumus uzglabā sausās un tīrās telpās, pie temperatūras +3°C- +25°C.

Utilizēšana: kopā ar sadzīves atkritumiem.

Derīguma termiņš- 3 gadi.

Sastāvs un ražošanas datums- skat. iepakojumā.

Zeķes apstrādātas ar benzalkonija hlorīdu.

Iepakojums: 1 pāris

Jūsu vērtējumus un ierosinājumus lūdzu sūtiet ražotājam.

Ražotājs: SIA „ITLA.LV”, Maskavas 250, Rīga, Latvija, LV-1063,
t.+37167112985, itla@itla.lv, www.itla.lv

